



Dispositifs Médicaux de Rééducation et Réhabilitation

NOVAFON POWER 2

Fréquences et Niveaux d'Intensité

Document préparé par PHYSIODYNA

25 juin 2026

1. Fréquences

Le **DAS NOVAFON POWER 2** dispose de 3 fréquences de vibration pour adapter le traitement à différents besoins thérapeutiques.

Fréquence	Désignation	Utilisation
100 Hz	Fréquence 1	Stimulation et réduction de la douleur
75 Hz	Fréquence 2	Activation musculaire et entraînement
50 Hz	Fréquence 3	Relaxation et détente musculaire

2. Niveaux d'Intensité

Le **POWER 2** offre 15 niveaux d'intensité contrôlables, permettant une adaptation précise à chaque patient.

Mode de Contrôle	Niveaux Disponibles
Via boutons physiques	5 niveaux par fréquence
Via application NOVAFON	Jusqu'à 15 niveaux total

3. Amplitude (Débattement de Vibration)

Paramètre	Valeur
Amplitude (plage)	0,3 à 4 mm
Profondeur de pénétration	Jusqu'à 6 cm

4. Recommandations d'Utilisation

Durée de traitement : Jusqu'à 20 minutes maximum par session avec pause obligatoire de 15 minutes. Jusqu'à 3 sessions par jour possible.

Intensité initiale : L'appareil démarre toujours à 100 Hz et au niveau d'intensité le plus bas. Il est recommandé d'augmenter progressivement selon la tolérance du patient.