



FICHE TECHNIQUE

PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS iStim EM-5200

Données techniques constructeur communiquées par Everyway Medical Instruments Co., Ltd.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Nombre de canaux	1
Forme d'onde	Biphasique
Étapes par programme	4
Temps stimulation	12 s (montée + contraction)
Temps relaxation	24 s
Durée totale d'un programme	37 min 48 s

ÉVOLUTION DES PROGRAMMES

Programme	Montée	Contraction	Relaxation
P1	2 s	10 s	24 s
P2	4 s	8 s	24 s
P3	6 s	6 s	24 s
P4	8 s	4 s	24 s
P5	10 s	2 s	24 s
P6	12 s	0 s	24 s

PARAMÈTRES DES 4 ÉTAPES

Étape	Fréquence (Hz)	Largeur d'impulsion (µs)
1	10	220
2	20	275
3	35	220
4	10	250

INTERPRÉTATION TECHNIQUE

Les programmes P1 à P6 utilisent les mêmes fréquences et les mêmes largeurs d'impulsion. La progression entre les programmes repose exclusivement sur l'augmentation du temps de montée et la diminution du temps de contraction, tout en conservant un temps total de stimulation de 12 secondes suivi d'une phase de relaxation de 24 secondes.

Source : Everyway Medical Instruments Co., Ltd. – Communication technique du 28 mai 2026.